



Fiche d'utilisation

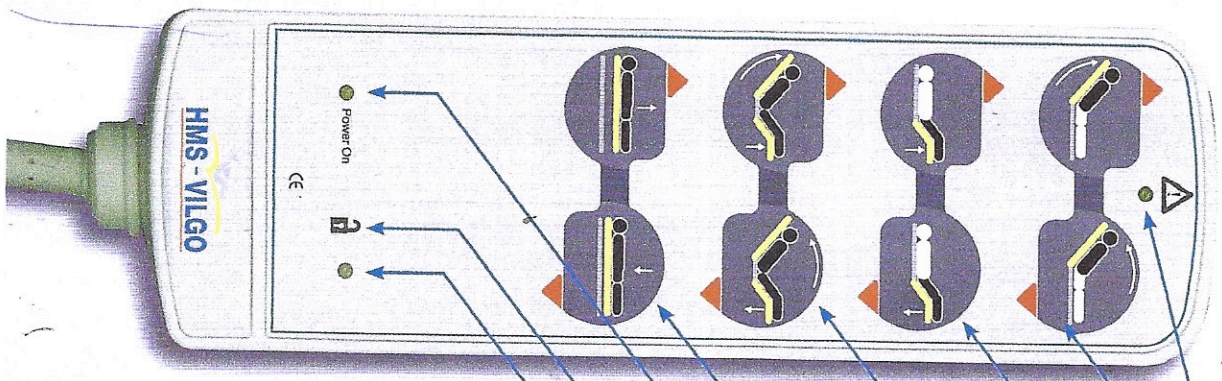

- VOYANT DE FONCTIONNEMENT
- COMMANDES DU RELEVÉ-BUSTE
- COMMANDES DU RELEVÉ-JAMBES
- POSITION "CONFORT"
- COMMANDES SIMULTANÉES DU RELEVÉ-BUSTE ET DU RELEVÉ-JAMBES
- COMMANDES DE HAUTEUR VARIABLE DU LIT
- VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- "VERROU"
- VOYANT A

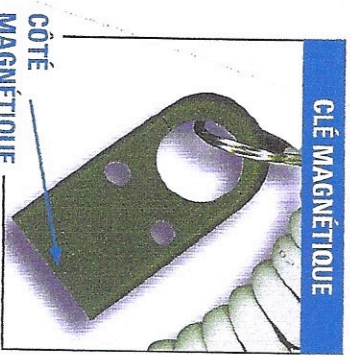

LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE FICHE D'UTILISATION ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS AU VERSO.
recommandations 24/07/02
AFSSAPS

En cas de doute, de panne ou d'urgence, veuillez appeler le numéro de téléphone ci-dessous

BRIDOUX SANTE S.A.
7/9, rue R. Salengro
62160 Bully
Tél : 03 21 72 77 72

LOCATION VENTE
MATÉRIEL MÉDICAL

Télécommande à clé magnétique

- Lors du branchement de la télécommande, le voyant de mise sous tension s'allume.
 - Le voyant A reste éteint ; cela signifie que la télécommande est inhibée (ne fonctionne pas).
 - Pour déverrouiller, passer le côté magnétique de la clé devant le symbole « verrou ».
 - Le voyant A s'allume : la télécommande est fonctionnelle, et reste dans cet état.
 - Pour inhiber, passer à nouveau le côté magnétique de la clé devant le symbole « verrou ».
 - Le voyant A s'éteint : la télécommande ne fonctionne plus (et reste dans cet état).
- Attention :** lors d'une interruption de l'alimentation (déconnexion, coupure) le voyant A s'éteint et verrouille la télécommande.
- Remarque :** la clé magnétique est un dispositif de sécurité, à la disposition du Personnel Soignant ou Accompagnant ; elle permet l'inhibition des fonctions électriques du lit en cas de besoin. Si l'inhibition des fonctions n'est pas nécessaire, laisser la clé magnétique accrochée au cordon. En cas de perte appeler votre Prestataire.

Consignes de sécurité

- Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
- La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
- Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et à ne pas faire de nœuds.
- Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
- Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien en appelant au numéro de téléphone noté au recto.

Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction. Votre responsabilité pourrait être engagée.



ATTENTION

- Conserver la télécommande et la clé magnétique hors de portée d'autres objets magnétisés ou aimantés.
- Ne pas utiliser d'autres champs magnétiques que celui de la clé pour tenter de verrouiller ou déverrouiller la télécommande.
- Ne pas laisser à la disposition d'enfants.