


# FICHE D'UTILISATION

## CLÉ DE VERROUILLAGE

INDICATEUR DE FONCTIONNEMENT  
VERT = fonction déverrouillée  
JAUNE = fonction verrouillée

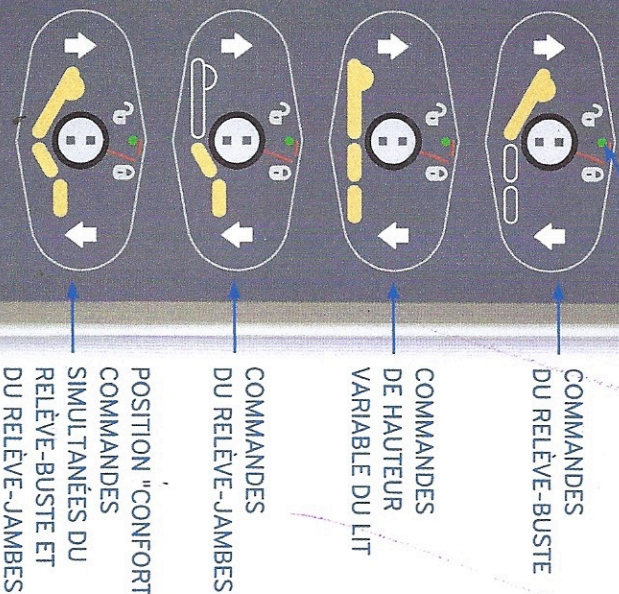

COMMANDES  
DU RELEVÉ-BUSTE

COMMANDES  
DE HAUTEUR  
VARIABLE DU LIT

COMMANDES  
DU RELEVÉ-JAMBES

POSITION "CONFORT"  
COMMANDES  
SIMULTANÉES DU  
RELEVÉ-BUSTE ET  
DU RELEVÉ-JAMBES

## LIRE ATTENTIVEMENT

LA PRÉSENTE  
FICHE D'UTILISATION  
ET RESPECTER  
SCRUPULEUSEMENT  
LES CONSIGNES

ET RECOMMANDATIONS  
AU VERSO.

AFFSAPS  
recommandations 24/07/02

En cas de doute, de panne ou d'urgence, veuillez appeler  
le numéro de téléphone ci-dessous



**BRIDOUX SANTE S.A.**  
719, rue R. Salengro  
62100 Bully  
Tél : 03 21 72 77 72

LOCATION VENTE  
MATÉRIEL MÉDICAL

## Télécommande à clé mécanique

• En façade de la télécommande se trouve le système de verrouillage/déverrouillage, fonction par fonction.

• D'origine la télécommande est déverrouillée.  
L'indicateur de fonctionnement est VERT.

• Pour verrouiller une fonction, insérer la clé dans le bouton de la fonction à verrouiller et tourner vers le symbole « verrou fermé ».

• L'indicateur de fonctionnement passe au JAUNE.  
• Pour déverrouiller, insérer la clé dans le bouton de la fonction à déverrouiller et tourner vers le symbole « verrou ouvert » en vous arrêtant au centre (ne pas forcer). L'indicateur de fonctionnement passe au VERT.

Remarque : la clé mécanique est un dispositif de sécurité, à la disposition du Personnel Soignant ou Accompagnant ; elle permet l'inhibition des fonctions électriques du lit en cas de besoin. Si l'inhibition des fonctions n'est pas nécessaire, laisser la clé mécanique accrochée au cordon. En cas de perte appeler votre Prestataire.

Lors d'une interruption de l'alimentation, la télécommande restera sur les positions de fonctions préalablement sélectionnées avant la coupure («verrou ouvert» ou «verrou fermé»).

## Consignes de sécurité

- Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
  - La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
  - Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et à ne pas faire de nœuds.
  - Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
  - Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
  - Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien en appelant au numéro de téléphone noté au recto.
  - Ne pas laisser à la disposition des enfants.
  - Après avoir donné les soins au patient, le lit doit toujours être remis en position basse afin d'éviter les chutes.
- Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction.  
Votre responsabilité pourrait être engagée.