



# FICHE D'UTILISATION

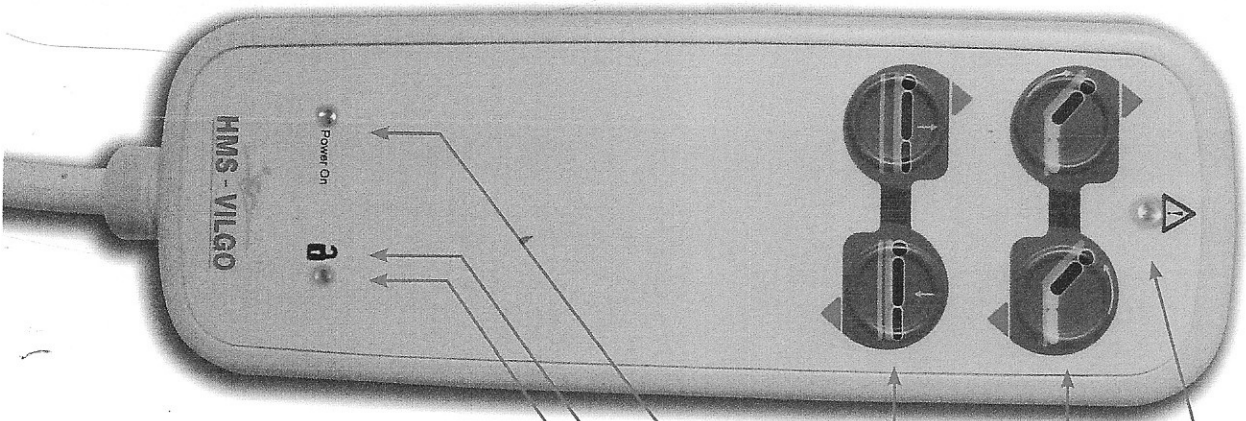

- VOYANT DE FONCTIONNEMENT
- COMMANDES DU RELEVÉ-BUSTE
- COMMANDES DE HAUTEUR VARIABLE DU LIT
- VOYANT DE MISE SOUS TENSION
- "VERROU"
- VOYANT A

## VERROUILLAGE AU DOS PAR CLÉ MÉCANIQUE

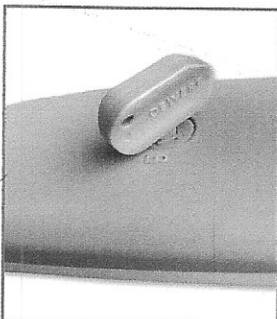

## LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE

**FICHE D'UTILISATION ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS AU VERSO.**  
AFSSAPS  
recommandations 24/07/02

En cas de doute, de panne ou d'urgence, veuillez appeler le numéro de téléphone ci-dessous

**BRIDOUX SANTE S.A.**

7/9, rue R. Salengro  
62160 Bully  
Tél : 03 21 72 77 72

LOCATION VENTE  
MATÉRIEL MÉDICAL

## Télécommande à clé mécanique

- Lors du branchement de la télécommande, le voyant de mise sous tension s'allume.
- Au dos de la télécommande se trouve le système de verrouillage/déverrouillage.
- Pour déverrouiller, tourner la clé mécanique vers le symbole « verrou ouvert » (a).
- Le voyant A s'allume : la télécommande est fonctionnelle et reste dans cet état même en cas d'interruption de l'alimentation.
- Pour inhiber, tourner à nouveau la clé mécanique vers le symbole « verrou fermé » (b).
- Le voyant A s'éteint : la télécommande ne fonctionne plus et reste dans cet état même en cas d'interruption de l'alimentation.

Remarque : la clé mécanique est un dispositif de sécurité, à la disposition du Personnel Soignant ou Accompagnant ; elle permet l'inhibition des fonctions électriques du lit en cas de besoin. Si l'inhibition des fonctions n'est pas nécessaire, laisser la clé mécanique accrochée au cordon. En cas de perte appeler votre Prestataire.

Lors d'une interruption de l'alimentation, la télécommande restera sur la position de la clé préalablement sélectionnée (« verrou ouvert » ou « verrou fermé »).

## Consignes de sécurité

- Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
- La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
- Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et à ne pas faire de nœuds.
- Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
- Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
- Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien en appelant au numéro de téléphone noté au recto.
- Ne pas laisser à la disposition des enfants.

Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction. Votre responsabilité pourrait être engagée.