

# MoliCare Premium Form

Technique de pose sur patient debout



## Principes de base

**SOIGNANT**

**Respect de l'ergonomie au poste de travail :**

- Muscles et articulations moins sollicités

**PATIENT**

**Sécurité :**

- Rester auprès du patient tout au long du change


**Dignité :**

- Préserver l'échange
- Garantir la relation patient-soignant


**Hygiène :**

- Glisser la protection à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière
- L'enlever par l'arrière

## 1 Préparer la protection

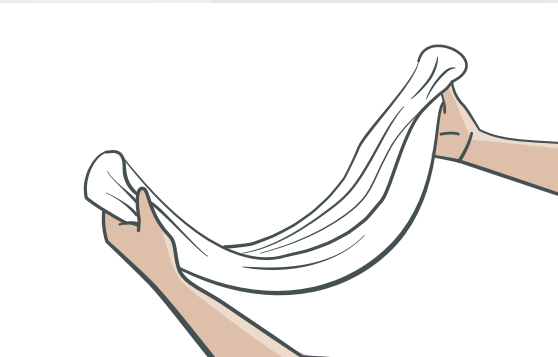


Je déplie la protection et je forme le godet.

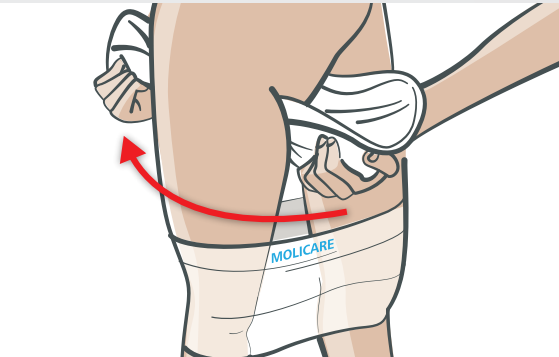


J'enfile le slip de fixation jusqu'à mi-cuisse. Je glisse la protection à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière.


## 2 Poser la protection

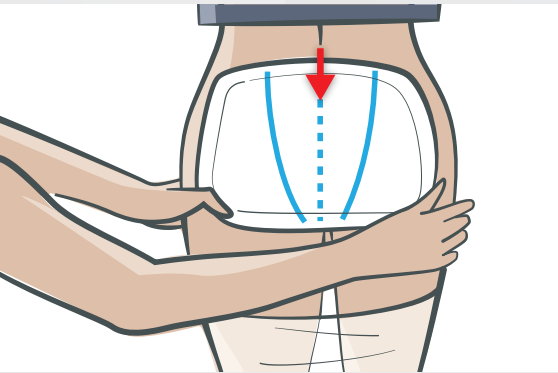

Je centre la protection à l'arrière en m'assurant que le témoin de saturation soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je veille à ce que le coussin arrière recouvre bien les fesses.

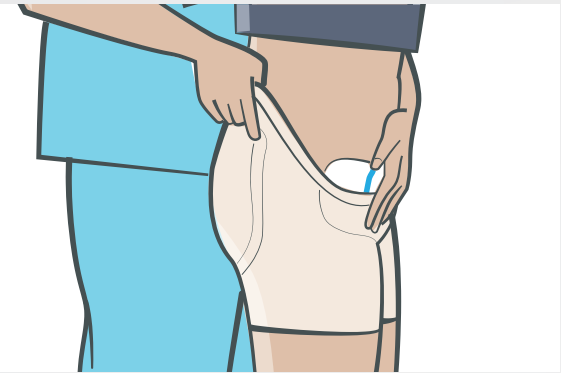

Je maintiens d'une main l'avant de la protection et je remonte le slip de fixation à l'arrière avec l'autre main.

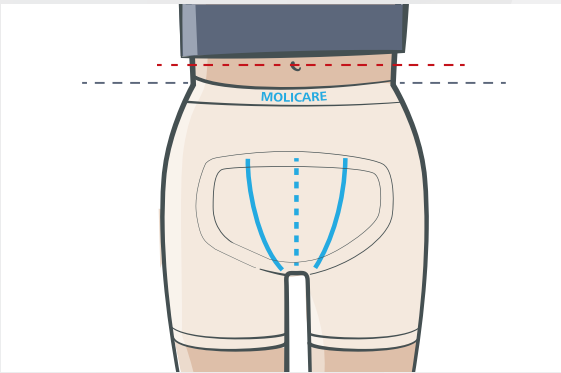

Je veille à ce que le slip de fixation soit positionné sous le nombril.

**Position de la protection :**

**chez la femme**

**chez l'homme**

**MoliCare Premium Fixpants long leg**

**Le slip de fixation : complément indispensable**

La taille est indiquée à l'intérieur du slip et est identifiable grâce à son code couleur.


Tour de hanches	Taille
45-80 cm	S 34-36
60-100 cm	M 36-42
80-120 cm	L 42-48
100-160 cm	XL 48-52
140-180 cm	XXL 52-60
160-200 cm	XXXL >60



# MoliCare Premium Form

## Technique de pose sur patient couché

Patient couché

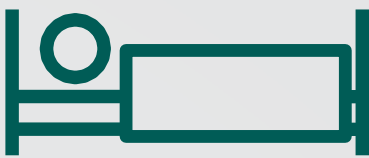

### Principes de base

**SOIGNANT**

**Respect de l'ergonomie au poste de travail :**

- Régler la hauteur du matelas au niveau du grand trochanter (hanche)
- Muscles et articulations moins sollicités

**PATIENT**

**Sécurité :**

- Tourner le patient vers soi en PLS
- Ne le manipuler qu'une fois


**Dignité :**

- Préserver l'échange
- Garantir la relation patient-soignant

**Hygiène :**

- Glisser la protection à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière
- L'enlever par l'arrière

## 1 Préparer la protection

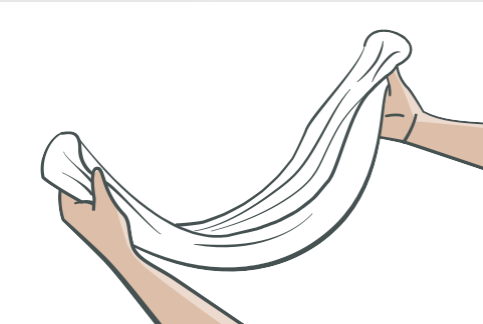

Je déplie la protection et je forme le godet.



J'enfile le slip de fixation jusqu'à mi-cuisse. Je tourne le patient vers moi en position PLS. J'attrape un côté du slip et je le retourne sous le genou pour le maintenir.


## 2 Poser la protection




Je glisse la protection à l'entrejambe de l'avant vers l'arrière.



Je centre la protection à l'arrière en m'assurant que le témoin de saturation soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je veille à ce que le coussin arrière recouvre bien les fesses.

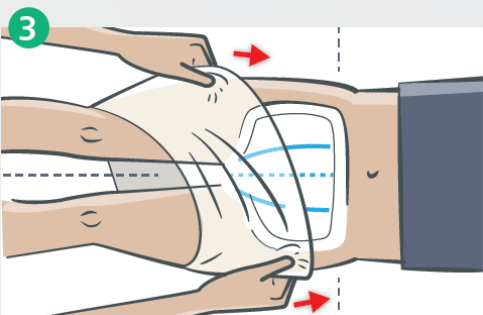


Je remonte le slip de fixation. Je retourne le patient sur le dos.

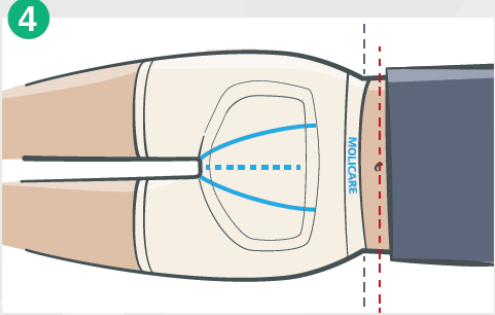

Je réajuste l'avant de la protection sur le ventre en vérifiant le bon positionnement des barrières anti-fuites. Je veille à ce que le slip de fixation soit positionné sous le nombril.

### Position de la protection :

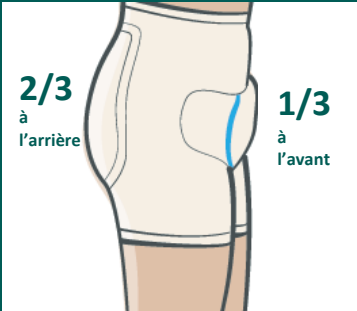

chez la femme



chez l'homme

### MoliCare Premium Fixpants long leg

Le slip de fixation : complément indispensable

La taille est indiquée à l'intérieur du slip et est identifiable grâce à son code couleur.

Tour de hanches	Taille	
45-80 cm	S	34-36
60-100 cm	M	36-42
80-120 cm	L	42-48
100-160 cm	XL	48-52
140-180 cm	XXL	52-60
160-200 cm	XXXL	>60



&



# Grandes protections anatomiques

pour fuites urinaires occasionnelles à permanentes  
et/ou pour incontinence fécale



## MoliCare® Premium Form

Pour patients valides, semi-valides  
ou dépendants, faciles à mobiliser  
nécessitant une prise en charge par les soignants.



**Ce produit reste à privilégier le plus longtemps possible  
pour solliciter et maintenir l'autonomie du résident.**

### Conseils d'utilisation

#### Sur patient en position debout



#### Sur patient en position couché



### Spécificité produit



#### Zone de maintien au sec renforcée

Technologie "Advanced Dry"  
qui offre un effet garde  
au sec 30% supérieur<sup>(1)</sup>  
pour une meilleure protection  
de la peau.

### Pose de la protection anatomique

#### Chez l'homme

1/2 à l'avant  
1/2 à l'arrière



#### Chez la femme

1/3 à l'avant  
2/3 à l'arrière



### MoliCare® Premium Fixpants long leg



**Complément indispensable  
à la fixation des protections  
MoliCare® Premium Form**



<sup>(1)</sup> effet garde au sec 30% supérieur par rapport à l'ancienne version de MoliForm.

<sup>(1)</sup> Dr Rui Miguel Paz (SM-PDI) "Rewet after ABL" - new PH rewet test method- september 2011 : absorption avant la première fuite.